



Epítesis CAP* autoadhesiva


Reutilizable • Uso externo

*Complejo Areola Pezón

Manual de uso

La **epítesis CAP (Complejo Areola Pezón) B-Care** es un apósito de silicona **reutilizable y autoadhesivo (sin pegamentos ni disolventes)** con componentes que garantizan la biocompatibilidad e higiene gracias a su **silicona de grado médico**, aportando protección y comodidad tras la extirpación total o parcial del complejo areola pezón.

Contenido del envase:

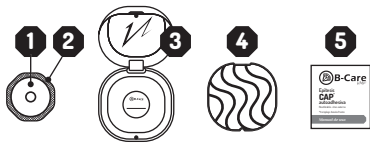


1. Epítesis CAP (CAP)
2. Base antiadherente
3. Estuche con espejo

4. Bandeja extraíble
5. Instrucciones de uso

¿Cómo usar el CAP?



Lavar la piel con agua y jabón y secar completamente
SIN AÑADIR OTROS PRODUCTOS (p. ej.: cremas)

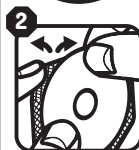

Para retirar el CAP, doblar la base antiadherente liberando el borde del CAP y estirar lenta y suavemente
SIN ENROLLARLO



Colocar sobre la zona deseada fijando toda su superficie y bordes
SIN ESTIRAR LA PIEL


¿Cómo cuidar el CAP?



Retirar el CAP **cada 24h máx.** y lavar con agua y jabón neutro por **ambas caras SIN OTROS PRODUCTOS**



Dejar secar siempre **AL AIRE** con la cara adhesiva hacia arriba sobre su bandeja extraíble
NO UTILIZAR PAPEL

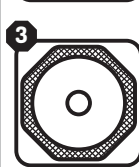

Una vez seco, depositar en el **lado rugoso de su base antiadherente** sin presionar y **guardar en el estuche**.
O poner en piel limpia y seca
PARA UN NUEVO USO



DUCHA




DEPORTE

poner → disfrutar →
REUTILIZABLE

Resistente al roce y al agua de tu rutina

cuidar ← quitar ←

SOL
MAR
PISCINA

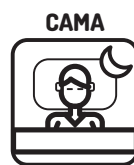

CAMA



Para más información,
escanea este QR
o visita nuestra web:



www.bellezon-care.com



BELLEZÓN TECHNOLOGY S.L.

Plaza CEIN, 5 • Oficina central T1 (Polígono Mocholi)
31110 Noáin (Navarra) España
+34 948 03 17 88
contacto@bzntech.com



Otras recomendaciones de uso



La epítisis CAP debe retirarse siempre de forma lenta y delicada. Una extracción rápida o fuerte puede dañar la adhesión y lesionar los tejidos del paciente.



No limpiar el CAP con productos corrosivos como acetona o alcohol
Usar sólo agua y jabón neutro.



No añadir ningún tipo de adhesivo (industrial o de otro tipo). **Pueden causar daños irreversibles en la epítisis y toxicidad en la piel.**



Pegar el CAP únicamente sobre la piel o el lado rugoso de su base. Cualquier otra superficie o material puede dañar su adhesión.



El CAP debe almacenarse en el interior de su estuche, apoyado sobre su base rugosa, para evitar el contacto con suciedad y otros agentes externos.



En caso de bordes enrollados, deslizar de forma delicada la zona doblada del CAP sobre la cara rugosa de su base antiadherente para separar el material doblado.

Advertencias y precauciones de uso

Uso externo. Aplicar solo sobre piel totalmente limpia, seca y libre de productos.
No utilizar si tiene **alergia a la silicona.**

No superar 24h de uso continuado sin retirar.

Tras su uso, es necesario limpiar la piel y el CAP con agua y jabón, pudiendo volver a usarse de nuevo una vez ambos estén secos y limpios.

Contraindicaciones:

El **incumplimiento de la limpieza diaria de la epítisis CAP** tras su uso puede elevar significativamente el **riesgo de formación de biofilm** (capa bacteriana), lo que puede desencadenar infecciones en los tejidos circundantes.

No aplicar sobre:

- Heridas abiertas/sin curar totalmente
- Costras/escamación de la piel
- Quemaduras
- Mucosas

Mantener **fuera del alcance de de los niños.**

En caso de detectar **cualquier molestia en la zona de aplicación de la epítisis durante o después de su uso,** retirarlo lentamente (en caso de llevarlo puesto) y lavar con agua y jabón la zona. Lavar y guardar el CAP en su estuche. Si las molestias persisten, consultar a un médico.

La adhesión del CAP se recupera y mantiene con un correcto lavado, secado y conservación.
Mantener **alejado de fuentes de calor.**

Cualquier incidente grave relacionado con el producto **debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente** del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente/usuario.

El CAP tiene una **vida útil aprox. de 6 meses** con un **uso diario intensivo y un cuidado correcto.** La vida útil puede variar en función de la frecuencia de uso y su mantenimiento, alterando su desgaste.



La epítisis CAP de B-Care es un producto reciclable. **Depositar en el punto limpio más próximo,** siguiendo la normativa vigente.

Símbolo	Significado
	Número de serie
	Identificador de producto único
	Precaución
	Producto sanitario
	Marcado CE
	Utilización múltiple en un único paciente
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Consulte las instrucciones de uso